






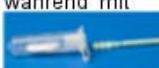




Wie generiert man eine DNA Probe ?

Nehmen Sie die DNA- Probe frühestens 1 Stunde
nach dem Essen, Trinken oder Zähneputzen

1 	Öffnen Sie die Verpackung vom Ende aus
2 	Entnehmen Sie das Abstrichstäbchen aus dem Behälter 
3 	Den Bürstenkopf in den Mund führen und fest an den Innenseiten der Wangen ca. 1 Minute auf- und abbewegen
4 	Den im Stäbchen inserierten Deckel in Richtung Bürstenkopf schieben
5 	Den Bürstenkopf in den Behälter stecken und den Deckel fest auf den Behälter setzen.  Danach den Behälter am Deckel festhalten, während mit der anderen Hand der Stab komplett aus dem Bürstenkopf gezogen wird. 
6 	Mit dem Stopfen den Deckel fest verschließen. Das Gefäß ist jetzt vollständig versiegelt.
7 	Entsprechend den weiteren Anweisungen, das Gefäß beschriften.