



Sicheres Anlegen der Schutzmaske

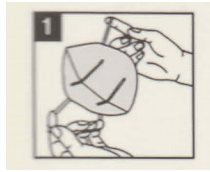

1. Halte die Maske mit beiden Händen an den Bändern und der Nasenbügel sollte oben liegen.



2. Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht, das Nase und Kinn bedeckt sind.

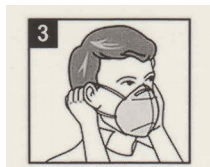

3. Ziehen Sie die Bänder auf beiden Seiten über die Ohren und passen Sie sie so an, bis Sie sich sicher fühlen.



4. Legen Sie Ihre Finger in die Mitte des Metall-Nasenbügels und bewegen Sie Ihre Finger zu beiden Seiten, bis der Nasenbügel vollständig in die Form der Nasenflügel gedrückt ist.



5. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Gesicht, um die Dichtigkeit der Maske zu Ihrem Gesicht zu überprüfen.